


ELETTRODO AD AGO ISOLATO MONOPOLARE - EMG

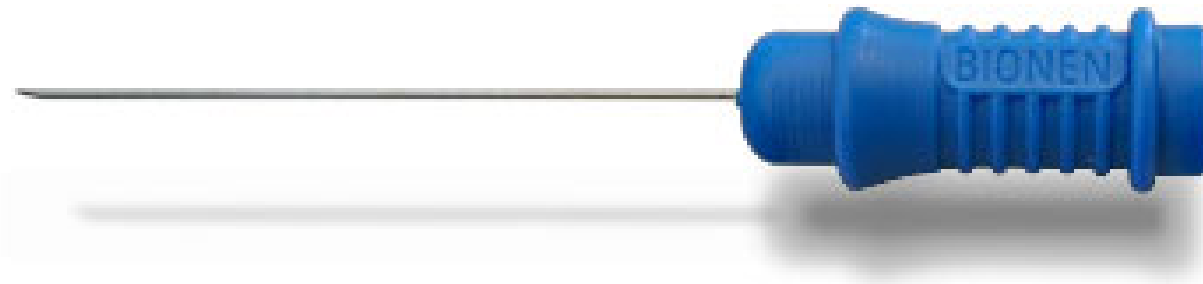

BIONEN S.A.S.

Via P. Petrocchi, 42/1
50127 Firenze – Italia
www.bionen.it

BIONEN
medical devices

ELETTRODO AD AGO ISOLATO MONOPOLARE - EMG

INFORMAZIONI GENERALI

Schema di funzionamento/utilizzo: Rilevazione di segnali biologici per esami Elettromiografici (EMG).

Precauzioni di utilizzo: Prima dell'uso, controllare la data di scadenza sulla confezione. Assicurarsi che la lunghezza dell'elettrodo ad ago monouso prescelto sia adeguata ai requisiti dell'esame. Inserire l'ago nel paziente rispettando una profondità massima di 3 mm dal raccordo. Qualora l'ago si pieghi prima, durante o dopo l'inserimento, NON raddrizzarlo o reinserirlo. Gli aghi piegati devono essere gettati e sostituiti con aghi nuovi.

Sterilizzazione: Dispositivo sterilizzato a Raggi Gamma. Dispositivo MONOUSO in confezione STERILE. NON RISTERILIZZARE. Il confezionamento sterile è garantito per 5 anni. Non utilizzare se la confezione è danneggiata, aperta o senza la stampa dei dati di rintracciabilità (codice - lotto - data scadenza). Non utilizzare oltre la data di scadenza. Qualora si verifici uno dei casi precedenti, gli aghi verranno sostituiti.

Durata di vita: Dispositivo MONOUSO. Non utilizzare dopo 5 anni dalla data di sterilizzazione.

Manipolazione e conservazione del dispositivo: Prestare attenzione durante la manipolazione del dispositivo per evitare il rischio di lesioni. Qualora l'ago si pieghi prima, durante o dopo l'inserimento, NON raddrizzarlo o reinserirlo. Gli aghi piegati devono essere gettati e sostituiti con aghi nuovi.

Confezionamento: Busta singola accoppiata sigillata. Scatola di 25 aghi.

Controindicazioni e interazioni: Nessuna.

Eventuale tossicità dichiarata: Nessuna. LATEX FREE

Modalità di trasporto e smaltimento: Non sono previste particolari modalità di trasporto. Per lo smaltimento degli elettrodi ad ago monouso utilizzati o non schermati servirsi di contenitori a norma per oggetti taglienti con potenziale rischio biologico. Per evitare il rischio di lesioni, smaltire senza riapplicare il copriago.

Codice CND: N010101

N. Repertorio Dispositivi Medici: 14502

Normativa: Dispositivo di classe IIa

Conforme alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. e prodotto in accordo alle procedure del Sistema Qualità BIONEN certificato ISO 13485.



ELETTRODO AD AGO ISOLATO MONOPOLARE - EMG

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI:

REF.	UM	N°	L AGO	Ø AGO	MATERIALE	COLORE CONNETTORE	
-	-	-	-	MM	GAUGE	-	
0024.071	NR.	1	25 mm	0,35 mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304 ISOLATO	NERO
0024.072	NR.	1	35 mm	0,35 mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304 ISOLATO	BLU
0024.073	NR.	1	45 mm	0,35 mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304 ISOLATO	GIALLO
0024.074	NR.	1	25 mm	0,45 mm	26	ACCIAIO INOX AISI 304 ISOLATO	ROSSO
0024.075	NR.	1	37 mm	0,45 mm	26	ACCIAIO INOX AISI 304 ISOLATO	VERDE
0024.076	NR.	1	50 mm	0,45 mm	26	ACCIAIO INOX AISI 304 ISOLATO	GRIGIO
0024.077	NR.	1	75 mm	0,50 mm	25	ACCIAIO INOX AISI 304 ISOLATO	NEUTRO

Cavo compatibile: REF. 0025.20X

