


ELETTRODO AD AGO SUBDERMALE MONOUSO

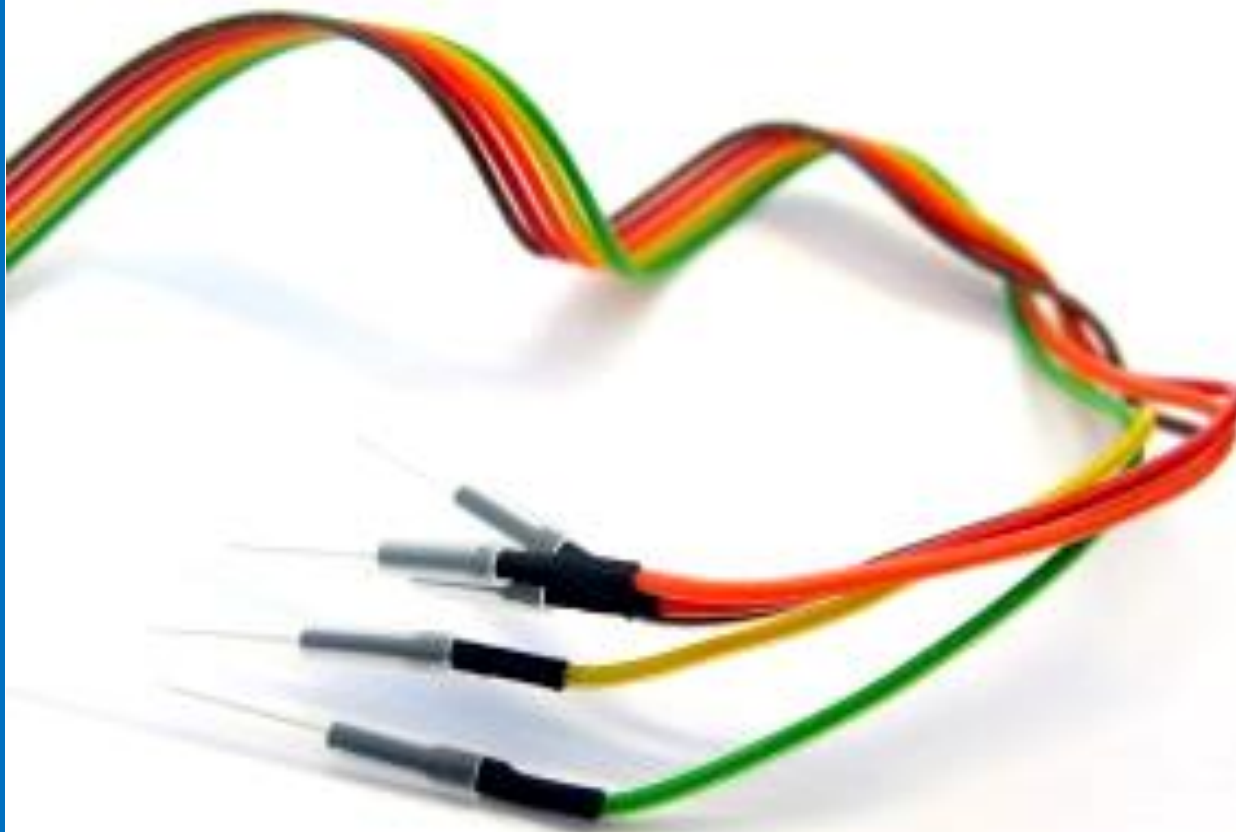

BIONEN S.A.S.

Via P. Petrocchi, 42/1
50127 Firenze – Italia
www.bionen.it

BIONEN
medical devices

ELETTRODO AD AGO SUBDERMALE MONOUSO

INFORMAZIONI GENERALI

Schema di funzionamento/utilizzo: Rilevazione di segnali biologici per esami Elettromiografici (EMG) e/o Elettroencefalografici (EEG).

Precauzioni di utilizzo: Prima dell'uso, controllare la data di scadenza sulla confezione. Assicurarsi che la lunghezza dell'elettrodo ad ago monouso prescelto sia adeguata ai requisiti dell'esame. Inserire l'ago nel paziente rispettando una profondità massima di 3 mm dal raccordo. Qualora l'ago si pieghi prima, durante o dopo l'inserimento, NON raddrizzarlo o reinserirlo. Gli aghi piegati devono essere gettati e sostituiti con aghi nuovi.

Sterilizzazione: Dispositivo sterilizzato a Raggi Gamma. Dispositivo MONOUSO in confezione STERILE. NON RISTERILIZZARE. Il confezionamento sterile è garantito per 5 anni. Non utilizzare se la confezione è danneggiata, aperta o senza la stampa dei dati di rintracciabilità (codice - lotto - data scadenza). Non utilizzare oltre la data di scadenza. Qualora si verifici uno dei casi precedenti, gli aghi verranno sostituiti.

Durata di vita: Dispositivo MONOUSO. Non utilizzare dopo 5 anni dalla data di sterilizzazione.

Manipolazione e conservazione del dispositivo: Prestare attenzione durante la manipolazione del dispositivo per evitare il rischio di lesioni. Qualora l'ago si pieghi prima, durante o dopo l'inserimento, NON raddrizzarlo o reinserirlo. Gli aghi piegati devono essere gettati e sostituiti con aghi nuovi.

Confezionamento: Busta singola accoppiata sigillata.

Controindicazioni e interazioni: Nessuna.

Eventuale tossicità dichiarata: Nessuna. LATEX FREE

Modalità di trasporto e smaltimento: Non sono previste particolari modalità di trasporto. Per lo smaltimento degli elettrodi ad ago monouso utilizzati o non schermati servirsi di contenitori a norma per oggetti taglienti con potenziale rischio biologico. Per evitare il rischio di lesioni, smaltire senza riapplicare il copriago.

Codice CND: N010101

N. Repertorio Dispositivi Medici: 14502

Normativa: Dispositivo di classe IIa

Conforme alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. e prodotto in accordo alle procedure del Sistema Qualità BIONEN certificato ISO ISO 13485.



ELETTRODO AD AGO SUBDERMALE MONOUSO

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI:

REF.	UM	N°	L AGO	Ø AGO		MATERIALE	CONNETTORE	CAVO	ISOLANTE
-				MM	GAUGE				
0020.037	NR	1	10mm	0,35mm	28	PLATINO	FMM D=1,5mm	120cm	NON ISOLATO
0020.038	NR	1	15mm	0,35mm	28	PLATINO	FMM D=1,5mm	120cm	NON ISOLATO
0020.039	NR	1	HOOK	0,35mm	28	PLATINO	FMM D=1,5mm	120cm	NON ISOLATO
0021.011	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	100cm	NON ISOLATO
0021.011-120	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	120cm	NON ISOLATO
0021.012	NR	1	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	100cm	NON ISOLATO
0021.012-120	NR	1	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	120cm	NON ISOLATO
0021.013	NR	1	25mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	100cm	NON ISOLATO
0021.013-120	NR	1	25mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	120cm	NON ISOLATO
0021.014	NR	1	35mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	100cm	NON ISOLATO
0021.014-120	NR	1	35mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	120cm	NON ISOLATO
0021.015	NR	1	45mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	100cm	NON ISOLATO
0021.015-120	NR	1	45mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	120cm	NON ISOLATO
0021.016	NR	1	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	100cm	NON ISOLATO
0021.016-120	NR	1	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	120cm	NON ISOLATO
0021.020-D30	NR	1	7mm	0,30mm	30	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	100cm	NON ISOLATO
0021.021	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	100cm	NON ISOLATO
0021.021-D25	NR	1	10mm	0,25mm	30	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	100cm	NON ISOLATO
0021.021-D40	NR	1	10mm	0,40mm	27	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	100cm	NON ISOLATO
0021.021-D40-150	NR	1	10mm	0,40mm	27	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	150cm	NON ISOLATO
0021.022	NR	1	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	100cm	NON ISOLATO
0021.022-D25	NR	1	15mm	0,25mm	30	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	100cm	NON ISOLATO
0021.023	NR	1	25mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	100cm	NON ISOLATO
0021.024	NR	1	35mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	100cm	NON ISOLATO
0021.025	NR	1	45mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	100cm	NON ISOLATO
0021.026	NR	1	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	100cm	NON ISOLATO
0021.021-120	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	120cm	NON ISOLATO
0021.022-120	NR	1	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	120cm	NON ISOLATO
0021.021-150	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	150cm	NON ISOLATO
0021.021-250	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	250cm	NON ISOLATO





ELETTRODO AD AGO SUBDERMALE MONOUSO

REF.	UM	N°	L AGO	Ø AGO		MATERIALE	CONNETTORE	CAVO	ISOLANTE
-				MM	GAUGE				
0021.022-150	NR	1	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	150cm	NON ISOLATO
0021.022-113-S-150	NR	1	13mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	150cm	NON ISOLATO
0021.022-113-S-250	NR	1	13mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	250cm	NON ISOLATO
0021.023-150	NR	1	25mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	150cm	NON ISOLATO
0021.024-150	NR	1	35mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	150cm	NON ISOLATO
0021.025-150	NR	1	45mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	150cm	NON ISOLATO
0021.026-150	NR	1	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	150cm	NON ISOLATO
0021.021-200	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	200cm	NON ISOLATO
0021.022-200	NR	1	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	200cm	NON ISOLATO
0021.023-200	NR	1	25mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	200cm	NON ISOLATO
0021.026-200	NR	1	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	200cm	NON ISOLATO
0021.021-250	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	250cm	NON ISOLATO
0021.022-250	NR	1	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	250cm	NON ISOLATO
0021.023-250	NR	1	25mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	250cm	NON ISOLATO
0021.026-250	NR	1	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	250cm	NON ISOLATO
0021.027	NR	1	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=2mm	60cm	NON ISOLATO
0021.030	NR	1	A VITE	0,55mm	24	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	100cm	NON ISOLATO
0021.030-120	NR	1	A VITE	0,55mm	24	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	120cm	NON ISOLATO
0021.031	NR	1	A VITE	0,55mm	24	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	150cm	NON ISOLATO
0021.032	NR	1	A VITE	0,55mm	24	ACCIAIO INOX AISI 304	2 FMM D=1,5mm	TWISTATO 250cm	NON ISOLATO
0021.033	NR	1	A VITE	0,55mm	24	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	200cm	NON ISOLATO
0021.050	NR	1	12mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	TWISTATO 100cm	NON ISOLATO
0021.051	NR	1	18mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	TWISTATO 100cm	NON ISOLATO
0021.052	NR	1	12mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	TWISTATO 150cm	NON ISOLATO
0021.052-B	NR	1	13mm	0,44mm	26	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	TWISTATO 150cm	NON ISOLATO
0021.053	NR	1	18mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	TWISTATO 150cm	NON ISOLATO
0021.054	NR	1	12mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	TWISTATO 200cm	NON ISOLATO
0021.055	NR	1	18mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	TWISTATO 200cm	NON ISOLATO
0021.056	NR	1	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	TWISTATO 200cm	NON ISOLATO
0021.057	NR	1	23mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	TWISTATO 200cm	NON ISOLATO
0021.058	NR	1	25mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	TWISTATO 200cm	NON ISOLATO
0021.054-250	NR	1	12mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	TWISTATO 250cm	NON ISOLATO



ELETTRODO AD AGO SUBDERMALE MONOUSO

REF.	UM	N°	L AGO	Ø AGO		MATERIALE	CONNETTORE	CAVO	ISOLANTE
-				MM	GAUGE				
0021.054-250-B	NR	1	13mm	0,44mm	26	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	TWISTATO 250cm	NON ISOLATO
0021.055-250	NR	1	18mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	TWISTATO 250cm	NON ISOLATO
0021.056-250	NR	1	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	TWISTATO 250cm	NON ISOLATO
0021.067	NR	1	10mm	0,35mm	28	PLATINO	FMM D=1,5mm	TWISTATO 100cm	NON ISOLATO
0021.068	NR	1	15mm	0,35mm	28	PLATINO	FMM D=1,5mm	TWISTATO 100cm	NON ISOLATO
0021.137	NR	1	10mm	0,35mm	28	PLATINO	FMM D=1,5mm	100cm	NON ISOLATO
0021.138	NR	1	15mm	0,35mm	28	PLATINO	FMM D=1,5mm	100cm	NON ISOLATO
0021.139	NR	1	HOOK	0,35mm	28	PLATINO	FMM D=1,5mm	100cm	NON ISOLATO
0021.201	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	5 POLI 150cm	NON ISOLATO
0021.202	NR	1	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	5 POLI 150cm	NON ISOLATO
0021.206	NR	1	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	5 POLI 150cm	NON ISOLATO
0021.211	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	5 POLI 100cm	NON ISOLATO
0021.212	NR	1	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	5 POLI 100cm	NON ISOLATO
0021.216	NR	1	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	5 POLI 100cm	NON ISOLATO
0021.221	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	15 FMM D=1,5mm	15 POLI 100cm	NON ISOLATO
0021.222	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	25 FMM D=1,5mm	25 POLI 100cm	NON ISOLATO
0021.223	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	13 FMM D=1,5mm	15 POLI 100cm	NON ISOLATO
0021.224	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	12 FMM D=1,5mm	15 POLI 100cm	NON ISOLATO
0021.225	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	25 FMM D=1,5mm	25 POLI 100cm	NON ISOLATO
0021.226	NR	1	10mm	0,25mm	30	ACCIAIO INOX AISI 304	12 FMM D=1,5mm	12 POLI 100cm	NON ISOLATO
0021.230	NR	1	13mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	7 FMM D=1,5mm	7 POLI 100cm	NON ISOLATO
0021.231	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	11 FMM D=1,5mm	11 POLI 120cm	NON ISOLATO
0021.241	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	10 FMM D=1,5mm	10 POLI 100cm	NON ISOLATO
0021.242	NR	1	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	10 FMM D=1,5mm	10 POLI 100cm	NON ISOLATO
0021.246	NR	1	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	10 FMM D=1,5mm	10 POLI 100cm	NON ISOLATO
0021.307	NR	1	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	25 FMM D=1,5mm	25 POLI 100cm	NON ISOLATO
0021.308	NR	1	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	25 FMM D=1,5mm	25 POLI 100cm	NON ISOLATO
0021.401	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	15 FMM D=1,5mm	15 POLI 300cm	NON ISOLATO
0021.402	NR	1	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	15 FMM D=1,5mm	15 POLI 30cm	NON ISOLATO
0021.406	NR	1	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	15 FMM D=1,5mm	15 POLI 30cm	NON ISOLATO
0021.411	NR	1	A VITE	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	4 FMM D=1,5mm	4 POLI 160cm	NON ISOLATO
0021.416	NR	1	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	10 FMM D=1,5mm	10 POLI 160cm	NON ISOLATO

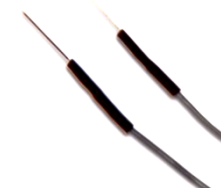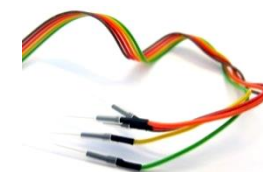

ELETTRODO AD AGO SUBDERMALE MONOUSO

REF.	UM	N°	L AGO	Ø AGO		MATERIALE	CONNETTORE	CAVO	ISOLANTE
-				MM	GAUGE				
0023.011	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	120cm	ISOLATO
0023.012	NR	1	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	120cm	ISOLATO
0023.013	NR	1	25mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	120cm	ISOLATO
0023.014	NR	1	35mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	120cm	ISOLATO
0023.015	NR	1	45mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	120cm	ISOLATO
0023.016	NR	1	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=2mm	120cm	ISOLATO
0023.021	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	120cm	ISOLATO
0023.022	NR	1	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	120cm	ISOLATO
0023.022-150	NR	1	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	150cm	ISOLATO
0023.023	NR	1	25mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	120cm	ISOLATO
0023.024	NR	1	35mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	120cm	ISOLATO
0023.025	NR	1	45mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	120cm	ISOLATO
0023.026	NR	1	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	120cm	ISOLATO
0023.030	NR	1	20mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	TWISTATO 150cm	ISOLATO
0023.031	NR	1	35mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	TWISTATO 150cm	ISOLATO
0023.051	NR	1	13mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	200cm	ISOLATO
0024.001	CF	5	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE	NON ISOLATO
0024.001-S	NR	1	12mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE	NON ISOLATO
0024.002	CF	5	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE	NON ISOLATO
0024.003	CF	5	25mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE	NON ISOLATO
0024.004	CF	5	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE	NON ISOLATO
0024.005	CF	5	12mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE 6cm	NON ISOLATO
0024.005-8	CF	5	12mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE 8cm	NON ISOLATO
0024.006	CF	5	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE 6cm	NON ISOLATO
0024.007	CF	5	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE 6cm	NON ISOLATO
0024.008	CF	5	25mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE 6cm	NON ISOLATO
0024.009	CF	5	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE 6cm	NON ISOLATO
0024.00A	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=0,7mm	SCONNETTIBILE 6cm	NON ISOLATO
0024.00B	NR	1	5mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=0,7mm	SCONNETTIBILE 6cm	NON ISOLATO
0024.00C	NR	1	25mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=0,7mm	SCONNETTIBILE 6cm	NON ISOLATO
0024.00D	NR	1	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=0,7mm	SCONNETTIBILE 6cm	NON ISOLATO
0024.00E	NR	1	35mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=0,7mm	SCONNETTIBILE 6cm	ISOLATO



ELETTRODO AD AGO SUBDERMALE MONOUSO

REF.	UM	N°	L AGO	Ø AGO		MATERIALE	CONNETTORE	CAVO	ISOLANTE
-				MM	GAUGE				
0024.011	NR	1	20mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	SCONNETTIBILE 10cm	NON ISOLATO
0024.012	NR	1	30mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	SCONNETTIBILE 10cm	NON ISOLATO
0024.013	NR	1	40mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	FMM D=1,5mm	SCONNETTIBILE 10cm	NON ISOLATO
0024.020	NR	1	25mm	0,25mm		ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE	NON ISOLATO
0024.021	NR	1	10mm	0,25mm		ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE	NON ISOLATO
0024.022	NR	1	15mm	0,25mm		ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE	NON ISOLATO
0024.023	NR	1	20mm	0,25mm		ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE	NON ISOLATO
0024.024	NR	1	HOOK	0,25mm		ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE	NON ISOLATO
0024.030	NR	1	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE	ISOLATO
0024.031	NR	1	25mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE	ISOLATO
0024.032	NR	1	35mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE	ISOLATO
0024.033	NR	1	45mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=1mm	SCONNETTIBILE	ISOLATO
0024.041	NR	5	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=0,7mm	SCONNETTIBILE	NON ISOLATO
0024.042	NR	5	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=0,7mm	SCONNETTIBILE	NON ISOLATO
0024.043	NR	5	25mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=0,7mm	SCONNETTIBILE	NON ISOLATO
0024.044	NR	5	HOOK	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MCH D=0,7mm	SCONNETTIBILE	NON ISOLATO
0026.011	NR	1	10mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MICROCONNECTOR	SCONNETTIBILE	NON ISOLATO
0026.012	NR	1	15mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MICROCONNECTOR	SCONNETTIBILE	NON ISOLATO
0026.013	NR	1	20mm	0,35mm	28	ACCIAIO INOX AISI 304	MICROCONNECTOR	SCONNETTIBILE	NON ISOLATO

